



# VISCODERM<sup>®</sup> hydrobooster

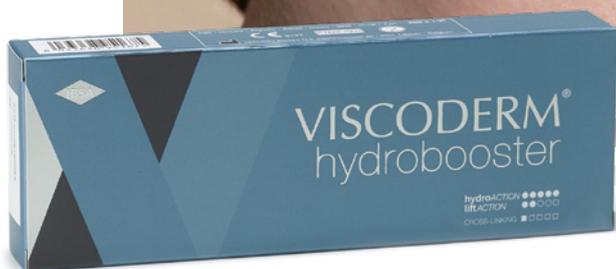

**LE SUCCÈS DE L'HYDRATATION.**  
*La qualité visible sur la peau.*

**CHAQUE PERSONNE EST UN CHEF-D'ŒUVRE.**

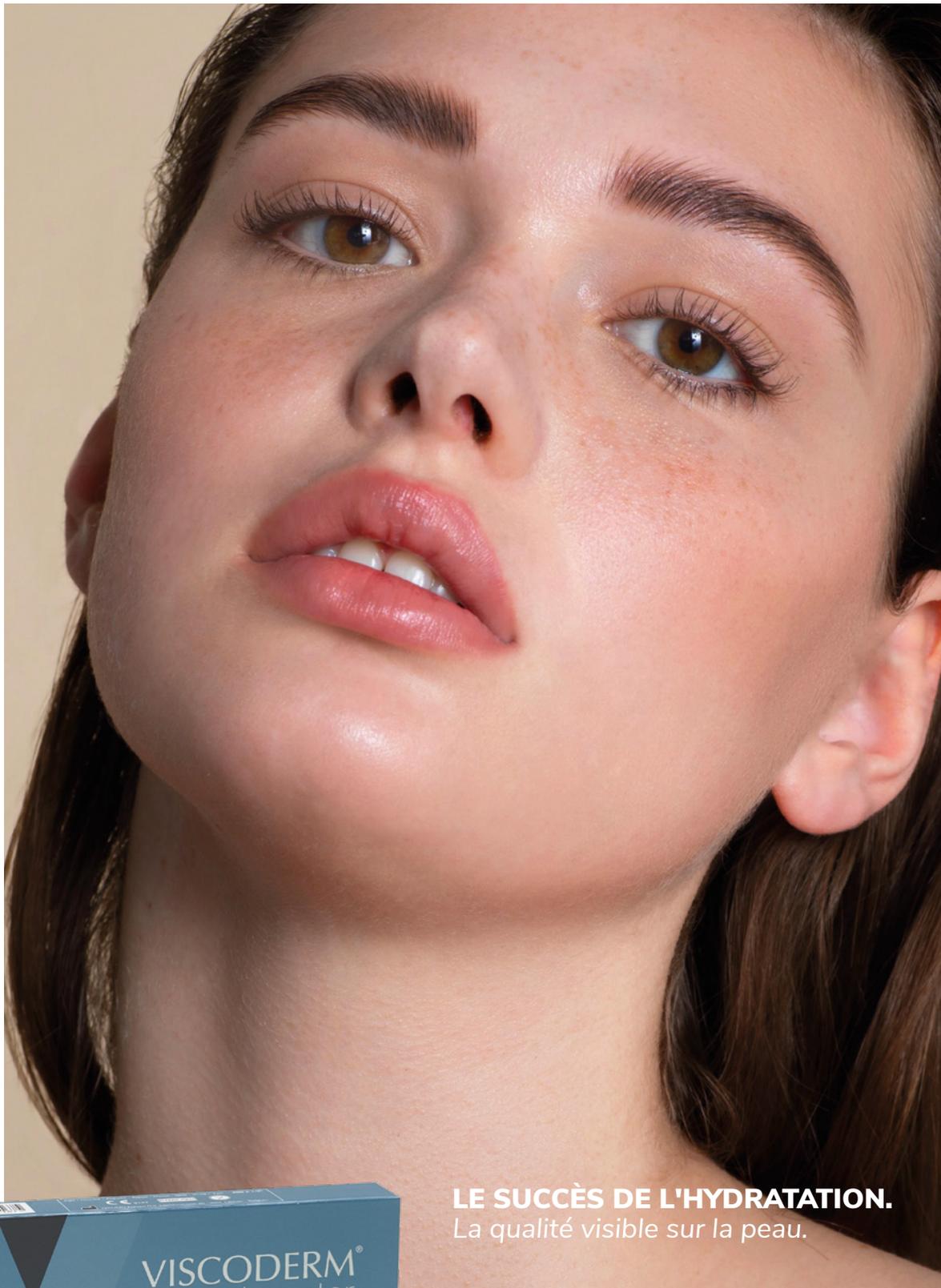

Caring Innovation

# IBSA GROUP

Fondé par un groupe de biologistes suisses en 1945, IBSA - Institut Biochimique SA, a acquis une expérience unique dans la recherche et la technologie pharmaceutiques. IBSA a utilisé son expérience et son expertise dans le domaine pharmaceutique pour étendre son activité et développer des dispositifs médicaux pour la dermatologie, basés sur l'acide hyaluronique, en créant ainsi une marque dédiée à la dermo-esthétique : **IBSA Derma**. IBSA Derma se distingue sur ce vaste marché par sa maîtrise de l'ensemble du cycle de vie du produit, de la production par biofermentation de la matière première, jusqu'au produit fini prêt à l'emploi en seringues préremplies.

PLUS DE **25** BUREAUX  
ET SITES DE  
PRODUCTION

---

DES CENTAINES DE PRODUITS  
COUVRANT **10** DOMAINES  
THÉRAPEUTIQUES

---

DES PRODUITS  
DISPONIBLES DANS  
PLUS DE **80** PAYS

---

IBSA EST UN DES LEADERS  
PHARMACEUTIQUES DANS LA  
**PRODUCTION D'ACIDE HYALURONIQUE  
(AH) ET DE PRODUITS** CONTENANT DE L'AH

CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE

---

DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES

---

MAÎTRISE DE L'ENSEMBLE DU PROCESSUS  
DE PRODUCTION de la matière première de  
l'AH au produit fini

---

SITES DE PRODUCTION À LA POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE

---



L'approche d'IBSA Derma vise à combattre la diminution physiologique de la quantité d'acide hyaluronique dans la peau, restaurant ainsi son hydratation, son élasticité et sa tonicité. En effet, l'acide hyaluronique associe de manière synergique une hydratation profonde à une action mécanique de lifting de la peau.

Grâce à l'utilisation innovante d'acide hyaluronique *ultrapur*, nous pouvons désormais affirmer qu'**IBSA Derma a redéfini les canons de la beauté classique.**

Au cours de l'histoire, la beauté répondait à des normes bien définies et spécifiques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car **IBSA Derma a redéfini les règles de beauté tout en valorisant l'authenticité de chaque personne.**

# CHAQUE PERSONNE EST UN CHEF-D'ŒUVRE

**IBSA Derma met en valeur la beauté intrinsèque de chacun,  
montrant ainsi que nous sommes tous des chefs-d'œuvre.**

Finis les visages qui se ressemblent et les procédés visant à gommer les traits somatiques ; désormais, les personnes authentiques sont la seule référence de beauté qui compte.

# VISCODERM®

## SOIGNER LA PEAU DE L'INTÉRIEUR...

VISCODERM® propose des solutions ciblées et des protocoles spécifiques, pour répondre aux besoins des médecins en matière de réduction des effets du processus de vieillissement de la peau.

## SYSTÈME DE RÉNOVATION CUTANÉE MULTI-ACTION

Grâce à son excellente tolérance, son efficacité cliniquement prouvée<sup>2,3</sup> et l'acide hyaluronique *ultrapur* d'IBSA.

# VISCODERM<sup>®</sup> hydrobooster

## LES DEUX EXPRESSIONS DE L'ACIDE HYALURONIQUE

VISCODERM<sup>®</sup> HYDROBOOSTER contient un acide hyaluronique stabilisé capable d'offrir une **DOUBLE FONCTION** : un processus d'**HYDRATATION** et de restructuration tissulaire, ainsi qu'une action mécanique d'**ÉTIREMENT** des rides les plus superficielles, à l'origine de son action **HYDROSTRETCH UNIQUE**.

L'action Hydrostretch est rendue possible par les propriétés rhéologiques de VISCODERM<sup>®</sup> HYDROBOOSTER ; la faible rigidité du gel, sa viscosité et sa grande déformabilité permettent une intégration tissulaire optimale et son utilisation à différents niveaux du derme, jusqu'aux couches les plus superficielles. C'est pourquoi VISCODERM<sup>®</sup> HYDROBOOSTER est particulièrement efficace sur les zones dynamiques du visage (péribuccale, périoculaire et front).

# VISCODERM<sup>®</sup> hydrobooster

EXPRESSION PRIMAIRE

HYDRATATION PROFONDE



Amélioration de l'élasticité, de l'éclat  
et de la douceur de la peau.


Activité biostructurante prolongée  
dans le temps et sécurité grâce à la  
formulation spécifique.

# HYDRATATION PROFONDE

## TECHNIQUE MICROLINÉAIRE RÉTROGRADE OU MICROBOLUS

INJECTER VISCODERM® HYDROBOOSTER DANS LE DERME MOYEN-PROFOND, EN UTILISANT LA TECHNIQUE MICROLINÉAIRE OU LA TECHNIQUE **MICROBOLUS** (< 0,05 ML CHACUN) DANS LES ZONES DU VISAGE QUI NÉCESSITENT UNE HYDRATATION PROFONDE (ZONES MALAIRES/SOUS-MALAIRES).

UN LÉGER MASSAGE EST RECOMMANDÉ APRÈS LE TRAITEMENT.

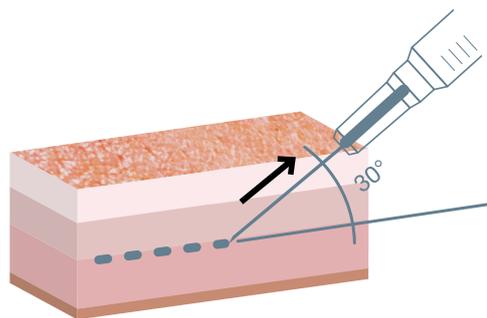

Il est recommandé d'utiliser une aiguille 29G

AVANT LE TRAITEMENT



1 MOIS APRÈS LE 1<sup>ER</sup> TRAITEMENT



Avec l'autorisation du Dr R. Russo (Italie)

### **Patiente 1**

**Type 1 selon la classification de Glogau, premiers signes de rides dans la zone malaire.**

# **PROTOCOLE**

**2 traitements à 2 mois d'intervalle, répéter 2 fois par an**

# VISCODERM<sup>®</sup> hydrobooster

EXPRESSION SECONDAIRE

ÉTIREMENT SUPERFICIEL



Étirement des rides superficielles  
pour les personnes présentant des  
signes de vieillissement modérés  
à avancés (types 2 et 3 de l'échelle  
de Glogau).<sup>1,2</sup>

Particulièrement indiqué pour  
les zones dynamiques du visage  
(péribuccale, périoculaire, front).

# ÉTIREMENT SUPERFICIEL

## TECHNIQUE MICROGOUTTE


INJECTIONS DE **MICROGOUTTES** (< 0,01 ML CHACUNE) DANS LE TRAJET DE LA RIDE. UN LÉGER MASSAGE EST RECOMMANDÉ APRÈS LE TRAITEMENT POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL.



**PARTICULIÈREMENT INDIQUÉ POUR LES PERSONNES QUI PRÉSENTENT UN VIEILLISSEMENT DE TYPE 2 SELON L'ÉCHELLE DE GLOGAU (RIDES DYNAMIQUES).**

**Classification Glogau**

TYPE 2 : RIDES DYNAMIQUES

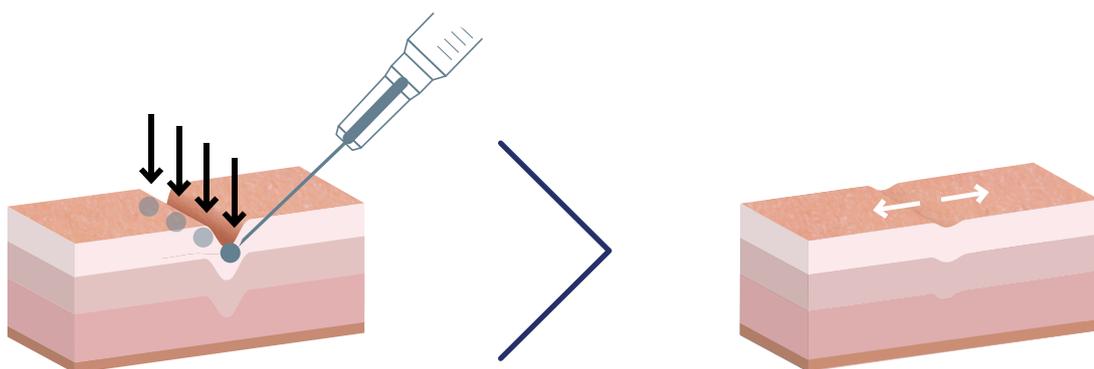

Il est recommandé d'utiliser une aiguille 33G

AVANT LE TRAITEMENT



3 MOIS APRÈS LE 2<sup>E</sup> TRAITEMENT



Avec l'autorisation du Dr P. Piersini (Italie)

**Patiente 2**

**Type 2 selon la classification de Glogau, avec une légère présence de rides frontales.**

# **PROTOCOLE**

**2 traitements à 2 mois d'intervalle, répéter 2 fois par an**

# ÉTIREMENT SUPERFICIEL

## TECHNIQUE DUODYNAMIQUE


CETTE TECHNIQUE COMBINÉE EST INDIQUÉE POUR LES PATIENTS QUI PRÉSENTENT DES SIGNES AVANCÉS DE VIEILLISSEMENT – TYPE 3 DE L'ÉCHELLE DE GLOGAU (RIDES AU REPOS).

COMMENCER PAR LA TECHNIQUE **MICROLINÉAIRE RÉTROGRADE** (< 0,01 ML) AU-DESSOUS DU TRAJET DE LA RIDE (SUPPORT), SUIVIE PAR DES INJECTIONS DE **MICROGOUTTES** (< 0,01 ML) DANS LA MÊME RIDE (ÉTIREMENT).

UN LÉGER MASSAGE EST RECOMMANDÉ APRÈS LE TRAITEMENT POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL.



**Classification Glogau**  
TYPE 3 : RIDES AU REPOS

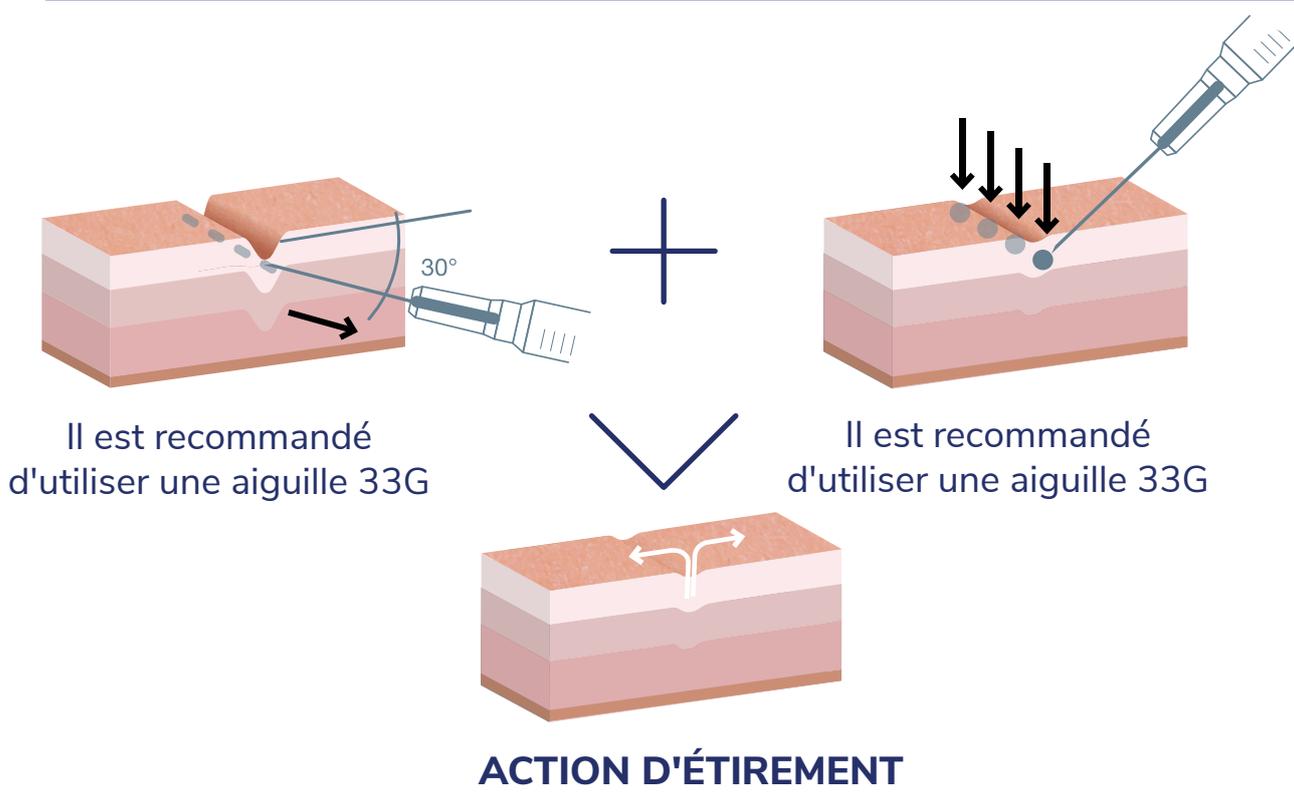

AVANT LE TRAITEMENT



3 MOIS APRÈS LE 2<sup>E</sup> TRAITEMENT



Avec l'autorisation du Dr P. Piersini (Italie)

### Patiente 3

Type 3 selon la classification de Glogau, avec présence visible de rides dans la zone périoculaire.

# PROTOCOLE

2 traitements à 2 mois d'intervalle, répéter 2 fois par an

# TECHNIQUE POUR LES CICATRICES D'ACNÉ

**Technique qui nécessite un détachement initial du tissu sous-jacent, puis un comblement de la zone avec un bolus proportionnel à la profondeur de la cicatrice.**

**Cette technique soulève la dépression cicatricielle, tout en favorisant la réparation de la fibrose du derme.**

Il est recommandé d'utiliser une aiguille 29G

AVANT LE TRAITEMENT



3 MOIS APRÈS LE 2<sup>E</sup> TRAITEMENT



Avec l'autorisation du Dr A. Beatini (Italie)



# VISCODERM<sup>®</sup>

## hydrobooster

## ÉVALUATIONS CLINIQUES<sup>2</sup>


**Des résultats statistiquement significatifs confirment la performance esthétique et la durée de l'effet sur les rides dynamiques (rides du front, rides de la patte d'oie, rides verticales des lèvres) et les rides statiques du visage (pli nasolabial, rides de marionnette) jusqu'à 5 mois après la ligne de base.**

Étude monocentrique sur 18 sujets de sexe féminin (âge moyen de 49 ans) (Evaluation finale sur 14 patientes).

For clinical assessment, the Friedman test was performed, which was followed, in case of statistically significant results, by the Holm-Sidak Adjusted test.

## AMÉLIORATION DES RIDES PÉRIOCULAIRES


Analyse profilométrique  $\mu\text{m}$   
(valeur moyenne)

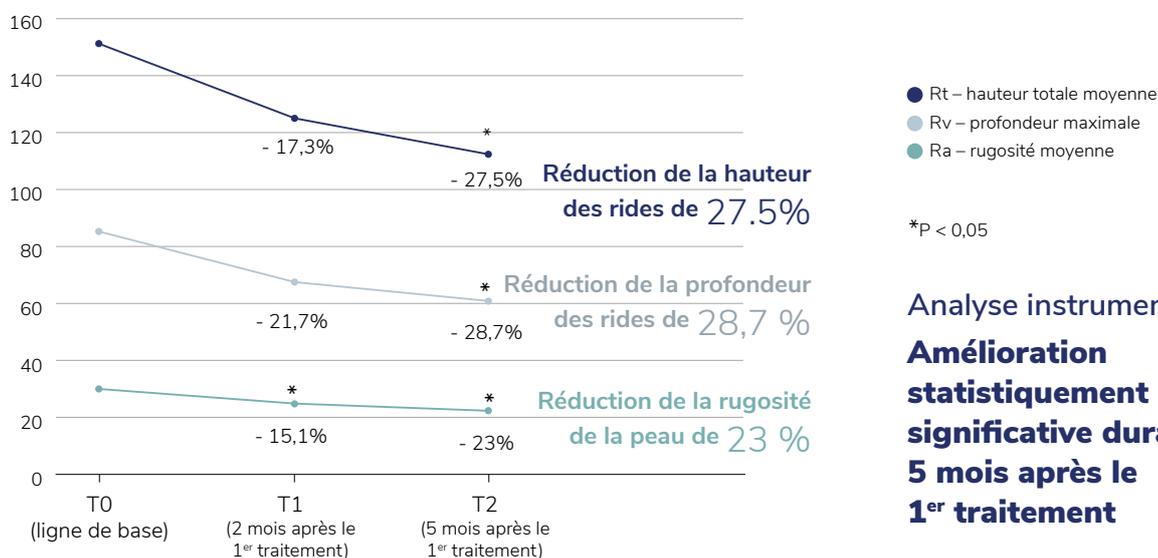

Analyse instrumentale :  
**Amélioration statistiquement significative durant 5 mois après le 1<sup>er</sup> traitement**

## Zone périoculaire

### Échelle photonumérique (échelle de gradation de la patte d'oie)

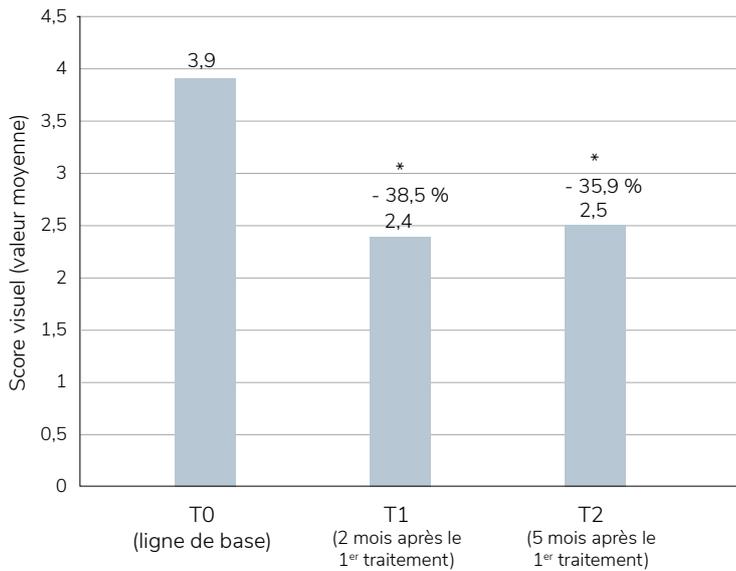


\*P < 0,05

Analyse clinique :

**Amélioration clinique d'au moins 1 grade chez 100 % des sujets selon l'échelle de référence photographique de la patte d'oie.**


## AMÉLIORATION PÉRIORALE

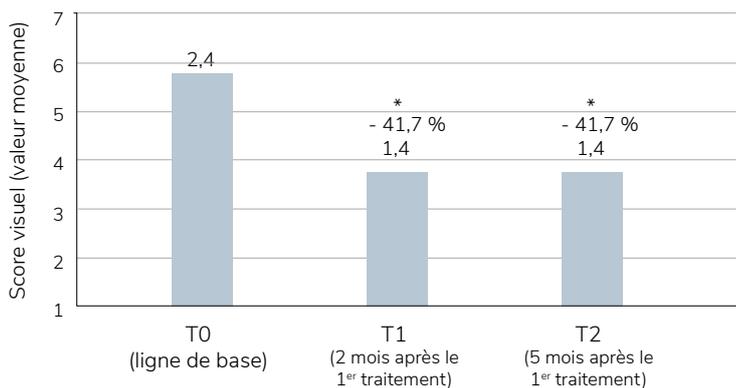

\*P < 0,05

**Amélioration clinique d'au moins 1 grade chez 79 % des sujets selon l'échelle de référence photographique NARINS**

## AMÉLIORATION DU MICRORELIEF DE SURFACE

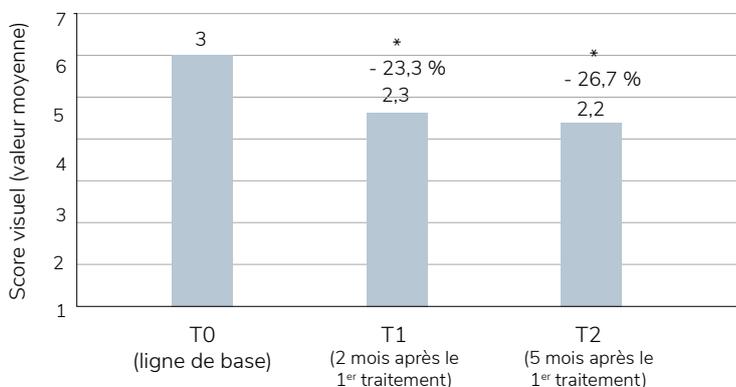


\*P < 0,05

Analyse clinique :

**Amélioration clinique d'au moins 1 grade chez 71 % des sujets selon l'échelle de référence photographique BEAGLY GIBSON**

Les effets secondaires sont comparables à ceux de la notice : réactions inflammatoires (rougeurs, oedèmes, etc.), parfois associées à des démangeaisons et à une sensibilité au toucher ; hématomes ; durcissement ou nodules au niveau du site d'injection ; coloration et décoloration de la peau au niveau du site d'injection

# VISCODERM<sup>®</sup> hydrobooster

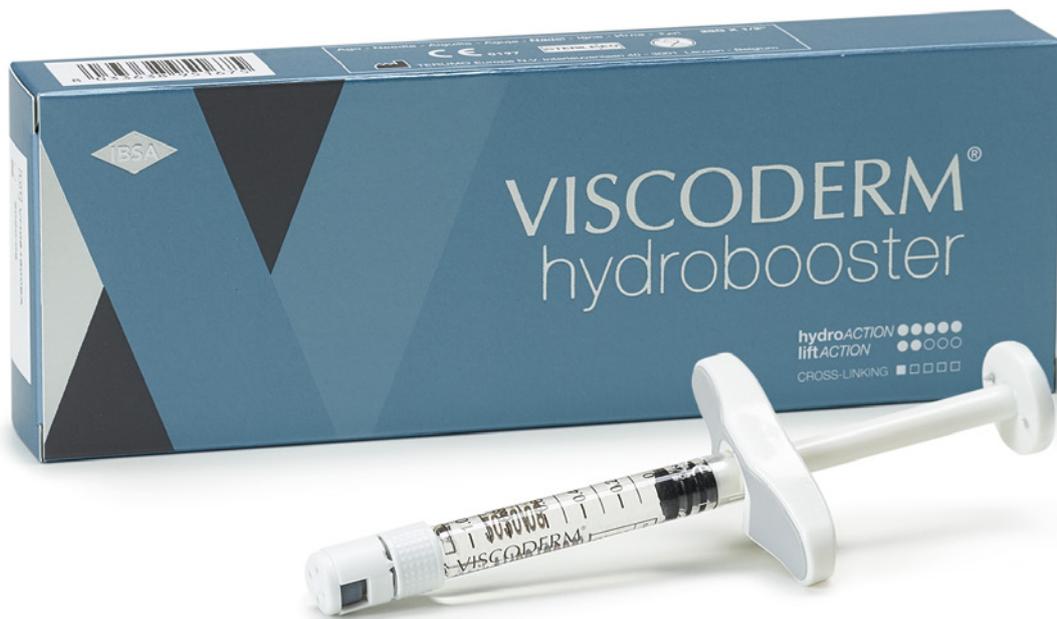

VISCODERM<sup>®</sup> HYDROBOOSTER CONTIENT 25 MG D'ACIDE HYALURONIQUE RÉTICULÉ.  
CE DISPONIBLE EN SERINGUE EN VERRE PRÉREMPLIE DE 1,1 ML, PRÊTE À L'EMPLOI,  
AVEC 2 AIGUILLES 29G X 13 MM.

**hydroACTION** ●●●●●  
**liftACTION** ●●○○○

CROSS-LINKING ■□□□□

CE<sub>0373</sub>

Viscoderm<sup>®</sup> Hydrobooster est indiqué pour restaurer l'hydratation intradermique et pour améliorer la structure et l'élasticité de la peau.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Dispositif médical de classe III. Marquage CE 0373.  
Fabricant : Rose Pharma SA. Pas de prise en charge LPPR.

Date d'édition : Avril 2021. Numéro interne de référencement : 21-04-GENEVRIER-PM-004

## Références

1. Glogau RG. Aesthetic and anatomic analysis of the aging skin. *Semin. Cutan. Med. Surg.* 1996; 15(3):134–8.
2. Sparavigna A, Tenconi B, Giori AM, Bellia G, La Penna L. Evaluation of the efficacy of a new hyaluronic acid gel on dynamic and static wrinkles in volunteers with moderate aging/ photoaging. *Clin. Cosmet. Investig. Dermatol* 2019; 12:81–90.
3. Beatini A, Piersini P, Russo R. “REAL LIFE” efficacy evaluation of a new hyaluronic acid gel suitable for deep hydration and fine wrinkles correction. *aesthetic medicine* Sept 2019; 5(3)



IBSA Farmaceutici Italia S.r.l  
Via Martiri di Cefalonia 2 - 26900 Lodi - Italie

-  [ibsaderma.com](http://ibsaderma.com)
-  [info@ibsaderma.com](mailto:info@ibsaderma.com)
-  [ibsa.derma](https://www.facebook.com/ibsa.derma)
-  [ibsa\\_derma](https://www.instagram.com/ibsa_derma)

